

**Enthält/contains/contient/contiene:**

Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015.

**Reinigungstablette für Zahnschienen**

**Cleansing tablet for dental splints**

**Comprimé à nettoyage pour gouttières dentaires**

**Comprimido para la limpieza de férulas dentales**

**Compressa per la pulizia dei bite**

**Tabletki do profesjonalnego czyszczenia szyn**

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 032**  
32 Tabs



**Oxydens Clean-set**

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 030**  
1 Oxydens Clean-set (box + cup) • 32 Tabs



**Oxydens Clean-box**

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 031**  
5 Oxydens Clean-boxes



**Oxydens Clean-cup**

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 033**  
5 Oxydens Clean-cups



**Reinigungstablette für Zahnschienen:**

Knirscherschienen, Retainer, Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl Schnarchschiutz, kieferorthopädische Apparaturen, Korrekturschienen, Prothesen usw.



Gesundheitsschädlich beim Verschlucken!  
Von Kindern fernhalten!  
Augenkontakt vermeiden!

**Gebrauchsinformationen:**

- Den Oxydens Clean-cup mit warmem Wasser bis an die Oberkante des Sichtfensters füllen.
- /3. Eine Oxydens Tablette und die zu reinigende Zahnschiene in die Oxydens Clean-box legen.
- Die geschlossene Clean-box für ca. 15 Min. in den Clean-cup stellen.
- Die Schiene durch die Clean-box von beiden Seiten gründlich durchspülen, Wasser ausschütten und die Schiene in der Clean-box aufbewahren.
- Vor dem Gebrauch die Schiene immer nochmal mit Wasser abspülen.

Ohne Oxydens Clean-set:

- Eine Oxydens Tablette in ein Glas mit warmem Wasser geben.
- Die Zahnschiene in das Glas einlegen.
- Die Zahnschiene für ca. 15 Min. im Glas lassen.
- Die Schiene jetzt und vor dem Gebrauch gründlich mit Wasser abspülen.

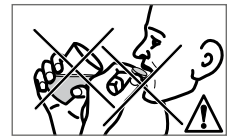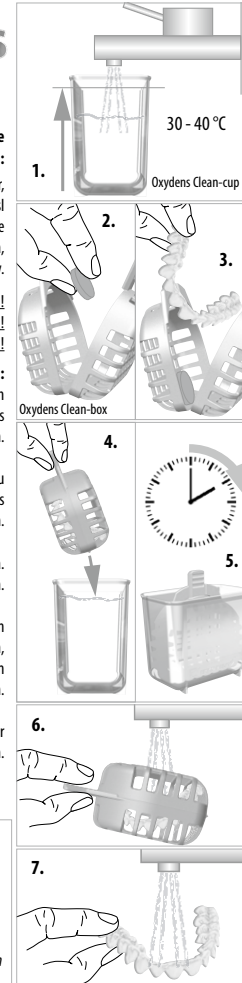

**Cleansing tablet for dental splints:**

nightguards, retainer, Playsafe sports-mouthguard, Silensor-sl anti-snoring device, orthodontic devices, corrective splints, dentures and more

Harmful if swallowed!  
Keep away from children!  
Avoid contact with eyes!

**Direction for use:**

- Fill the Oxydens Clean-cup with warm water up to the upper end of the clear window.
- Place one Oxydens tablet and the splint to be cleaned into the Oxydens Clean-box.
- Put the closed Clean-box into the Clean-cup for approx. 15 min.
- Rinse well the splint through the Clean-box from both sides. Shake out water and store the splint in the Clean-box.
- Rinse the splint one more time with water before use.

Without Oxydens Clean-set:

- Drop one Oxydens tablet into a glass with warm water.
- Put the splint into the glass.
- Leave the splint for approx. 15 min. in the glass.
- Rinse well the splint now and before use with water.